

清潔感・安心感・信頼感  
商品をお届けするために


1 洗浄・消毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒



2 検品・修理

安全性もしっかり確認

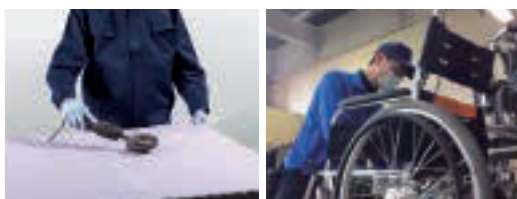

3 保管

梱包し、清潔な場所で保管・管理



4 お届け

安心・安全な福祉用具をお届け



ベッド・ベッド付属品



床ずれ防止用具



体位変換器



認知症老人徘徊感知機器



手すり



歩行補助杖



歩行器



車椅子・車椅子付属品



スロープ



移動用リフト・つり具



介護保険購入対象品

腰掛便座・入浴補助用具



販売品




情報


## ケアスロープ

ケアメディックス

折り畳み時  
全幅 35

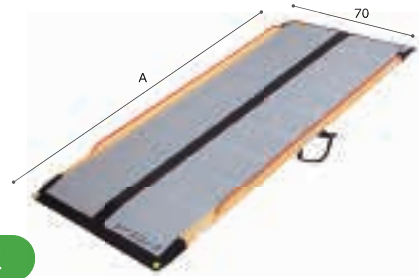

### STEP 1

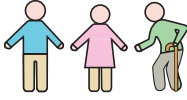

介助者の状況を確認し、選定してください。  
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°  
スロープの長さ  
||  
段差の高さ × 8倍以上

#### ケアスロープ選定理由例

《CS-175》  
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》  
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

### STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。



下部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。




アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く丈夫で安全に走行することができます。

### STEP 3



収納しやすい自立設計です。  
様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。

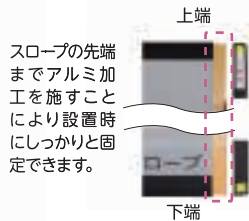

スロープの先端までアルミ加工を施すことにより設置時にしっかりと固定できます。

### STEP 4

設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。



走行面にソフトなすべり止めを採用しているので、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いても痛くありません。

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	<b>430</b> 円	860円	1,290円	4,300円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	<b>500</b> 円	1,000円	1,500円	5,000円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	<b>550</b> 円	1,100円	1,650円	5,500円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	<b>550</b> 円	1,100円	1,650円	5,500円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	<b>700</b> 円	1,400円	2,100円	7,000円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	<b>786</b> 円	1,572円	2,358円	7,860円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	<b>900</b> 円	1,800円	2,700円	9,000円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	<b>1,140</b> 円	2,280円	3,420円	11,400円

## ケアスロープT




ケアメディックス

- ケアスロープと地面の隙間に傾斜補正台 (CS-T) を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの簡単設置。
- 高さ調節ができ、4cm~6cmまで対応可能です。
- 傾斜補正台 (CS-T) は脱輪防止アームを付け替えることで左右どちらでも設置可能です。

ケアスロープ CS-150~CS-285C

+ 傾斜補正台 CS-T

= ケアスロープT

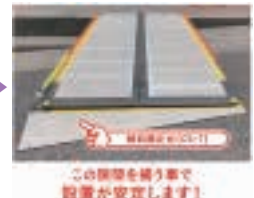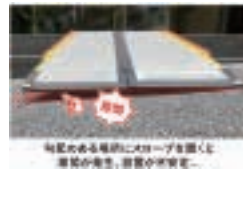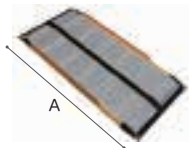

商品名	A	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CST-150 (CS-150+CS-T)	150	約11	28-1231-1	00093-000059	<b>900</b> 円	1,800円	2,700円	9,000円
CST-175 (CS-175+CS-T)	175	約12	28-1232-1	00093-000060	<b>990</b> 円	1,980円	2,970円	9,900円
CST-200 (CS-200+CS-T)	200	約13	28-1233-1	00093-000061	<b>1,100</b> 円	2,200円	3,300円	11,000円
CST-240 (CS-240C+CS-T)	240	約15	28-1234-1	00093-000062	<b>1,330</b> 円	2,660円	3,990円	13,300円
CST-285 (CS-285C+CS-T)	285	約18	28-1236-1	00093-000063	<b>1,870</b> 円	3,740円	5,610円	18,700円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

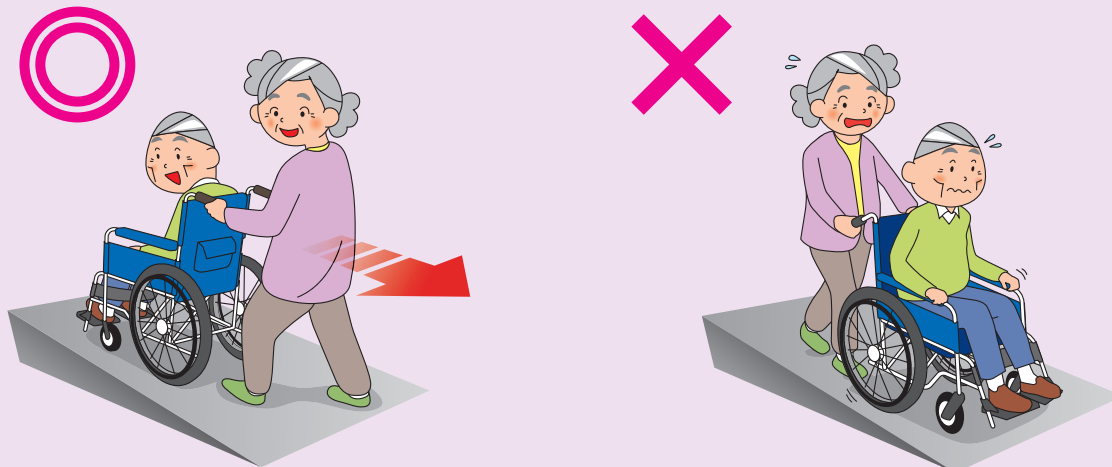

## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
歩行器												
スロープの長さ												
65cm	Green	Yellow	Purple									
70cm	Green	Yellow	Purple									
車椅子・ 車椅子 付属品												
85cm	Green	Yellow	Purple									
87.5cm	Green	Yellow	Purple									
100cm	Green	Yellow	Purple	Purple								
120cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple							
125cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple						
135cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple					
150cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple				
165cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple			
175cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple		
200cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	
205cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple
240cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple
245cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple
255cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple
285cm	Green	Yellow	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple

押してくれる人が  
限界の角度



傾斜角度 10~15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる


でも5°は  
きつい~!



傾斜角度 5°未満



傾斜角度 10°未満

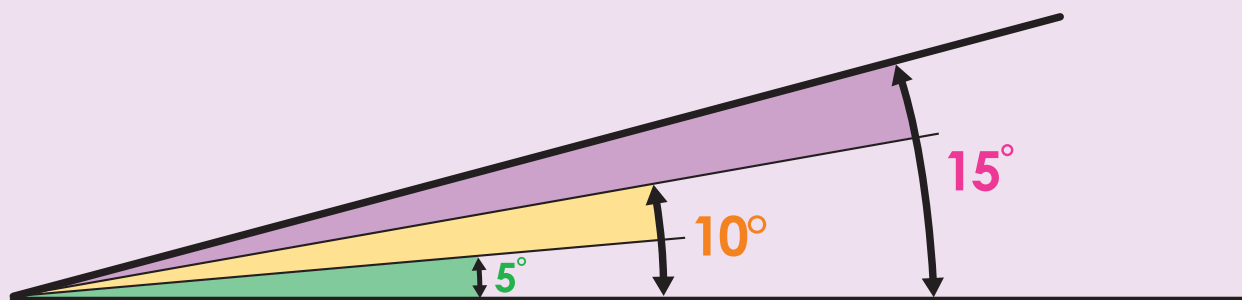

## ダンスロープエア-2

ダンロップホームプロダクツ

### 1.業界最軽量クラス ※1

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのスロープを開発。

### 2.乗り上げ時の衝撃を低減 ※2

車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。

### 3.汎用性の向上 ※2

全サイズの幅を70cm未満とし、今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。サイズ展開も7サイズあり、様々な住宅環境に適用可能です。


### 4.安全性の向上 ※2

側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。

### 5.補修性の向上 ※2

レンタル事業者様における補修作業を簡便化。


※1 JIS認証された車いす用可搬形スロープにおいての他社比較 (2020年8月メーカー調べ)  
※2 ダンロップホームプロダクツ社従来品との比較

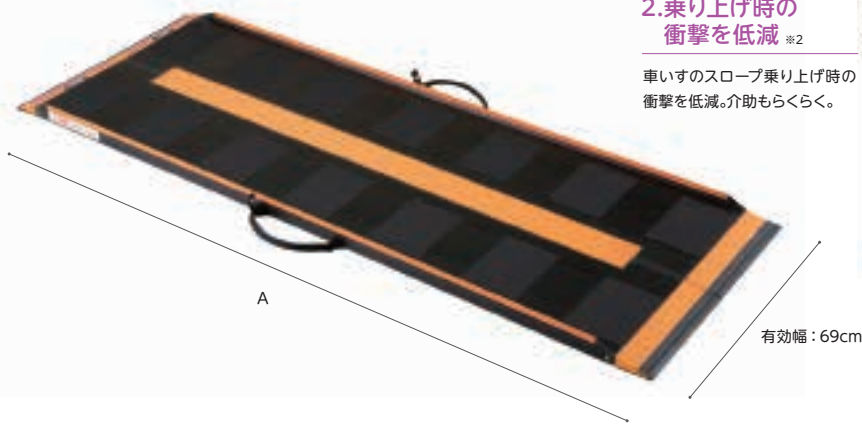

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85Z	85	約4.3	28-1177-1	00532-000054	550 円	1,100 円	1,650 円	5,500 円
R-125Z	125	約5.7	28-1174-1	00532-000053	664 円	1,328 円	1,992 円	6,640 円
R-165Z	165	約7.0	28-1172-1	00532-000052	730 円	1,460 円	2,190 円	7,300 円
R-205Z	205	約8.5	28-1178-1	00532-000051	854 円	1,708 円	2,562 円	8,540 円
R-230Z	230	約9.6	28-1179-1	00532-000050	956 円	1,912 円	2,868 円	9,560 円
R-255Z	255	約10.5	28-1180-1	00532-000049	1,042 円	2,084 円	3,126 円	10,420 円
R-285Z	285	約11.5	28-1181-1	00532-000048	1,210 円	2,420 円	3,630 円	12,100 円

## エコ段差スロープN

マツ六

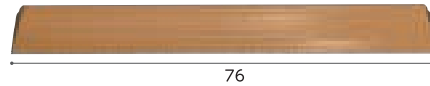

商品名	高さ(cm)	奥行き(cm)	勾配度数(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	50 円	100 円	150 円	500 円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	50 円	100 円	150 円	500 円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	50 円	100 円	150 円	500 円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	50 円	100 円	150 円	500 円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	50 円	100 円	150 円	500 円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	70 円	140 円	210 円	700 円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	70 円	140 円	210 円	700 円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	70 円	140 円	210 円	700 円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	90 円	180 円	270 円	900 円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	100 円	200 円	300 円	1,000 円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	100 円	200 円	300 円	1,000 円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報